

Termometr bezręczyowy CR.W00

Instrukcja używania

Informacje podstawowe:

- Wyrób medyczny SilMed Termometr bezręczyowy CR.W00 jest zgodny z normą EN 12470-1+A1:2010 Termometry lekarskie, część 1: Termometry szklane z urządzeniem maksymalnym, napętniane cieczą metaliczną.
- SilMed Termometr bezręczyowy CR.W00 jest bezpieczny i nietoksyczny, gdyż nie zawiera rtęci. Został wypełniony innowacyjnym stopem galu, indu i cyny, czyli galinstanem, który posiada właściwości pomiarowe rtęci.
- Szklana obudowa termometru zapewnia wygodne używanie, jest łatwa w czyszczeniu i może być poddawana dezynfekcji.
- Pomiar temperatury ciała za pomocą termometru bezręczyowego można przeprowadzić pod pachą, w ustach lub w odbycie.
- Zakres pomiaru temperatury termometrem bezręczyowym wynosi od 35 do 42°C.

Sposób używania:

- Wyjmij termometr z opakowania/etui.
- Przed użyciem upewnij się, czy słupek cieczy metalicznej w kapilarze znajduje się poniżej 36°C na skali pomiarowej. Jeżeli nie, ciecz należy strząsnąć poniżej tej wartości.
- Umyj i zdezynfekuj termometr.
- Umieść termometr w miejscu pomiaru tak, aby końcówka pomiarowa bezpośrednio dotykała ciała. Czas pomiaru powinien wynosić około 5 minut.
- Odczytaj wynik ze skali pomiarowej.

Szczegółowy opis metod pomiaru:

• Pomiar pod pachą

Umieść końcówkę pomiarową termometru w dole pachowym. Szczelnie dociśnij ramię do tułowia, aby podczas pomiaru termometr pozostał we właściwym miejscu. Nie dociskaj termometru zbyt mocno, aby nie doszło do jego uszkodzenia. Podczas pomiaru nie należy się poruszać.

• Pomiar w ustach

Umieść końcówkę pomiarową pod językiem. W celu zapewnienia szczelności zamknij usta na czas pomiaru. W trakcie pomiaru nie wolno mówić, jeść, poruszać się, itp. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika, nie wolno gryźć termometru.

• Pomiar w odbycie

W celu łatwiejszej aplikacji, końcówkę termometru przed pomiarem można posmarować lubrykantem i wsunąć ją do odbytu na głębokość około 2 cm. W trakcie pomiaru należy trzymać termometr tak, by pozostał w odpowiednim ułożeniu (aby nie wsunął się zbyt głęboko lub nie wypadł). Należy uważać, aby podczas pomiaru nie złamać termometru.

UWAGA: Po każdym użyciu należy umyć lub zdezynfekować termometr, a następnie strząsnąć ciecz metaliczną tak, by znalazła się poniżej 36°C na skali pomiarowej.

Szczegółowy opis metod strząsania cieczy pomiarowej:

- Zaleca się strząsanie cieczy natychmiast po wykonanym pomiarze, gdyż jest to wtedy najłatwiejsze.
- Włóż termometr do ułatwiającego strząsanie uchwyty z elastyczną końcówką, zwaną „motylkiem”. Upewnij się, że termometr nie wypadnie z uchwytu. Chwyć kciukiem i palcem wskazującym za motylek, a następnie przy jego pomocy wprowadź termometr w ruch wahadłowy. Powtarzaj czynność, aż ciecz pomiarowa osiągnie pożądany poziom. Podczas strząsania uważaj, aby nie uderzyć o nic termometrem. Powyższą czynność można wykonać również bez użycia plastikowego uchwytu.

Środki ostrożności:

- Termometr przeznaczony jest do klasycznego pomiaru temperatury ciała. Nie powinien być stosowany jako termometr owulacyjny lub termometr dla wcześniaków.
- Na 1 godzinę przed dokonaniem pomiaru nie należy spożywać posiłków, palić tytoniu ani brać kąpeli. Wymienione czynności mogą mieć wpływ na wynik pomiaru temperatury ciała.
- Termometr nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
- Należy uważać, by nie uszkodzić termometru. Uderzenie lub upuszczenie go może doprowadzić do pęknięcia szklanej obudowy, a w konsekwencji spowodować okaleczenie ciała.
- W przypadku uszkodzenia termometru i rozlania stopu metali, należy użyć wilgotnej szmatki z mydłem zachowując szczególną ostrożność.
- Nie wolno używać gorącej wody do sterylizacji termometru – może to spowodować jego uszkodzenie.
- Zaleca się wykonanie pomiaru kontrolnego przynajmniej raz w roku.
- Stosować u dzieci wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych.
- Nie należy dokonywać pomiaru w ustach u dzieci poniżej 10. roku życia.
- Nie wolno zanurzać ani myć termometru w wodzie o temperaturze wyższej niż jego maksymalny zakres pomiarowy.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Nie wystawiać termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Temperatura w trakcie przechowywania i transportu nie może przekraczać 42°C.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przechowywanie termometru w etui.

Czyszczenie i dezynfekcja:

- Temperatura roztworu do czyszczenia nie może przekraczać 42°C.
- Przed i po użyciu, termometr należy umyć letnią wodą z detergentem, a następnie zdezynfekować go wacikiem nasączonym alkoholem.

Warunki Gwarancji:

Niniejszy wyrób objęty jest 2 letnim okresem gwarancji, liczonym od daty zakupu, wskazanej na dowodzie zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady przedprodukcyjne i nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania lub stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do otrzymanego zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje wyłącznie gwarant. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego w przypadku niezgodności towaru z umową.

Reklamacje towaru w okresie gwarancyjnym należy zgłosić telefonicznie lub mailowo do firmy:

Helbo Sp. z o.o.
ul. Łódzka 80, 95-054 Ksawerów
tel: +48 728 955 471
mail: reklamacje@helbo.pl



Producent



Upoważniony przedstawiciel



Data produkcji



Numer serii



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją używania



Nie używać, gdy opakowanie jest uszkodzone



Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych



Przechowywać w temperaturze: -15°C – 42°C



Produkt powstał zgodnie z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej



WUXI MEDICAL INSTRUMENT FACTORY CO., LTD.

No. 43, Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi City,
Jiangsu 214194, China



Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10,
1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands

Importer:

HELBO Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Śliwiaka 14A, 30-797 Kraków
www.helbo.pl

Dystrybutor:

Silesian Pharma Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
www.silesianpharma.pl

3253/01u/AG

Data aktualizacji: luty 2021

