

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu wyrobu medycznego **Rinolan**, a następnie przecho-
wywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.



INSTRUKCJA UŻYWANIA
RINOLAN
maść nawilżająca do nosa

Wyrób medyczny

15 g



1. Co to jest Rinolan?

Rinolan to wyrób medyczny w postaci maści do nosa o właściwościach nawilżających oraz wspomagających utrzymanie odpowiedniej wilgotności błon śluzowych oraz podrażnionej i popękanej skóry w okolicy nosa. Zawarte w maści składniki tworzą ochronną barierę, zabezpieczającą przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, a tym samym chroniącą przed podrażnieniami. Maść **Rinolan** została wzbogacona o prebiotyki Biolin P, który wspomaga rozwój fizjologicznej flory bakteryjnej, tym samym zapobiegając rozwojowi drobnoustrojów patogennych.

2. W jakim celu stosuje się Rinolan?

Suchość nosa jest powszechnie występującym problemem zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Może się pojawiać w wyniku zbyt długiego przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach czy innych miejscach o zbyt niskiej wilgotności np. w czasie sezonu grzewczego. Suchość nosa towarzyszy także wielu chorobom, alergii oraz jest wynikiem stosowania niektórych leków. Problem ten dotyka również osoby starsze oraz narażone na działanie substancji chemicznych lub drażniących (np. w miejscu pracy).

Rinolan nie tylko nawilża, ale także utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności błon śluzowych przez dłuższy czas, tym samym łagodząc nieprzyjemne odczucia związane z ich suchością. Śluzówka nosa jest szczególnie narażona na działanie czynników zewnętrznych zwłaszcza podczas infekcji lub stanów alergicznych, powodujących jej podrażnienie, pieczenie czy ból. Zastosowanie **Rinolan** zmniejsza odczucie dyskomfortu poprzez wytworzenie warstwy ochronnej, ograniczającej dostęp czynników drażniących do błony śluzowej. Wyrób medyczny może być również stosowany na popękana i podrażniona skórę okolic nosa, spowodowane częstym czyszczeniem nosa podczas infekcji czy alergii.

3. Dawkowanie i sposób podania

Rinolan należy stosować zgodnie z instrukcją używania.

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego **Rinolan** należy dokładnie umyć ręce. Niewielką ilość maści rozprowadzić równomiernie na błony śluzowe nosa lub skórę okolic nosa. Stosować kilka razy dziennie, w miarę potrzeby.

Wyrób przeznaczony dla dzieci od pierwszego roku życia i dorosłych. Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Produkt donosowy. Unikać kontaktu z oczami.

4. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (alergia) na jakikolwiek składnik wyrobu.

5. Sposób przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. Skład

Woda, wazelina, gliceryna, olej parafinowy, uwodornione monoglicerydy oleju kokosowego, 1,2-heksanodiol, estry gliceryny i kwasu tłuszczowego, stearynian gliceryny SE, oliwa z oliwek, olej z ogórecznika lekarskiego, octan tokoferylu, Biolin P, karbomer, alkohol cetearylowy, stearynian gliceryny, benzoesan sodu, guma ksantanowa, wodorotlenek sodu, EDTA.

7. Opis opakowania

Rinolan pakowany jest w plastikową tubę zawierającą 15 g wyrobu. Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, zadrukowaną tubę oraz instrukcję używania.










Gofarm Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Górników 21/26
30-819 Kraków, Polska
www.gofarm.pl

Dystrybutor:

Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
www.silesianpharma.pl

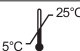

Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:

	Dane wytwórcy
	Data ważności
	Numer serii
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ograniczenie dopuszczalnej temperatury przechowywania wyrobu
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Numer katalogowy

Data wydania instrukcji używania: sierpień 2022

RNL/IU/08/2022
1014/01i/H