

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne dla pacjenta informacje o zastosowaniu wyrobu medycznego **Dentolik Żel na ząbkowanie**, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.

INSTRUKCJA UŻYWANIA

REF CH27

DENTOLIK 

Żel na ząbkowanie

Wyrób medyczny

15 ml

1. Co to jest wyrób Dentolik Żel na ząbkowanie?

Dentolik Żel na ząbkowanie to wyrób medyczny w formie powlekającego żelu stosowany miejscowo w celu utworzenia ochronnego filmu na powierzchni dziąseł. Łagodzi objawy w tym ból, obrzmienie, zaczerwienienie i ślinienie spowodowane ząbkowaniem. Ma przyjemny malinowy smak.

Wyrób przeznaczony dla niemowląt od 2. miesiąca życia.

2. W jakim celu stosuje się wyrób Dentolik Żel na ząbkowanie?

Ząbkowanie jest procesem fizjologicznym, który najczęściej przebiega bez powikłań miejscowych w jamie ustnej oraz bez powikłań ogólnych. Niekiedy ząbkowaniu mogą towarzyszyć objawy miejscowe i ogólne. Wyrzynające się zęby wywierają ucisk na śluzówkę dziąseł, objawiając się zaczerwienieniem, obrzmieniem i swędzeniem co może sprawiać niemowlęciu ból. Może występować duże zróżnicowanie wieku ząbkowania uwarunkowane różnymi czynnikami.

Dentolik Żel na ząbkowanie zawiera w swoim składzie:

Hialuronian sodu wysokocząsteczkowy – tworzący ochronny film na powierzchni dziąseł,

Aloes – wykazujący działanie nawilżające, łagodzące zaczerwienienia podrażnionych dziąseł,

Ksylitol – naturalny słodzik, zapewniający skuteczną ochronę pierwszych zębów przed próchnicą,

Aromat malinowy – przyjemny i uwielbiany przez niemowlęta smak.

Dentolik Żel na ząbkowanie to kompleksowy wyrób, który łagodzi objawy miejscowe w jamie ustnej związane z ząbkowaniem. Zawarty w wyrobie wysokocząsteczkowy hialuronian sodu posiada udowodnione w badaniach naukowych działanie w łagodzeniu odczuć bólowych związanych z ząbkowaniem u niemowląt.

3. Dawkowanie i sposób podania wyrobu Dentolik Żel na ząbkowanie

Dentolik Żel na ząbkowanie należy aplikować zgodnie z instrukcją używania. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób użycia:

Preparat do stosowania miejscowego na dziąsła. Umyć starannie ręce przed użyciem. Wyrób stosować od 3 do 6 razy dziennie, najlepiej po posiłkach i przed snem. Niewielką ilość żelu (1 – 2 krople) nanieść na czysty palec, szczoteczkę silikonową lub jałowy wilgotny gazik. Delikatnie masować dziąsła przez 2-3 minuty. Aby przedłużyć czas działania żelu, po jego zastosowaniu w miarę możliwości unikać podawania jedzenia i picia.

Wyrób medyczny **Dentolik Żel na ząbkowanie** należy stosować do momentu ustąpienia objawów oraz maksymalnie przez 7 dni.

4. Ostrzeżenia

Jeśli w ciągu 7 dni nie nastąpi poprawa lub nastąpi pogorszenie objawów, należy zaprzestać stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem. Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu oraz gdy opakowanie jest uszkodzone.

5. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (alergia) na jakikolwiek składnik wyrobu. Nie stosować do oczu, do wnętrza ucha.

6. Sposób przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. Skład wyrobu Dentolik Żel na ząbkowanie

Składniki główne: hialuronian sodu wysokocząsteczkowy, sok z liści aloesu zwyczajnego, ksylitol.

Składniki pomocnicze: woda oczyszczona, gliceryna, hydroksyetyloceluloza, benzoesan sodu, sorbionian potasu, chlorek cetylopirydyniowy, aromat malinowy, kwas mlekowy.

8. Opis opakowania

Dentolik Żel na ząbkowanie pakowany jest w plastikową tubę zawierającą 15 ml żelu. Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, zadrukowaną tubę o pojemności 15 ml oraz instrukcję używania.



Gofarm Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Górników 21/26

30-819 Kraków, Polska

www.gofarm.pl

Wyprodukowano dla:








Silesian Pharma Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

www.silesianpharma.pl



Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:

	Dane wytwórcy
	Data ważności
	Numer serii
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Temperatura przechowywania
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Numer katalogowy