

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne dla pacjenta informacje o zastosowaniu wyrobu medycznego **HemoPROCTOL**, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.

## INSTRUKCJA UŻYWANIA

**REF**

WH10

### **HemoPROCTOL**

#### **Medyczny żel do stosowania w stanach hemoroidalnych**

Wyrób medyczny

50 ml

#### **1. Co to jest wyrób HemoPROCTOL?**

**HemoPROCTOL** to wyrób medyczny w postaci żelu zawierający składniki łagodzące objawy występujące u osób z patologicznymi zmianami w obrębie hemoroidów, takie jak podrażnienie skóry otaczającej odbytu, świąd, pieczenie i bolesność okolicy odbytu. Forma żelu z odpowiednio dobranym składem działa kojąco i przynosi ulgę już bezpośrednio po zastosowaniu.

Produkt łatwo się rozprowadza i nie pozostawia tłustej warstwy ani zapachu.

Przeznaczony dla osób dorosłych. Wyrób może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz matki karmiące piersią.

#### **2. W jakim celu stosuje się wyrób HemoPROCTOL?**

Guzki krwawnicze (hemoroidy) to fizjologiczne struktury naczyniowe zlokalizowane w końcowym odcinku przewodu pokarmowego, a więc w kanale odbytu. Związany z nimi stan patologiczny (stopniowe rozszerzanie naczyń) to choroba hemoroidalna. Stosowanie wyrobu **HemoPROCTOL** zaleca się w przypadku dolegliwości hemoroidalnych takich jak dyskomfort, podrażnienie skóry otaczającej odbytu, świąd, pieczenie, bolesność oraz zaczerwienienie okolicy odbytu, które mogą towarzyszyć zarówno hemoroidom wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Na problem najbardziej narażone są osoby wykonujące długotrwałą pracę w pozycji siedzącej (kierowcy, pracownicy biurowi), zawodowi sportowcy (ciężarowcy, rowerzyści, motocykliści), kobiety w ciąży i w okresie po porodzie.

Wyrób medyczny po aplikacji tworzy film (warstwę o funkcji bariery), chroniąc skórę odbytu przed podrażnieniem czynnikami zewnętrznymi (w tym podczas wypróżniania).

Dzięki zawartości kwasu hialuronowego, aloesu i gliceryny, nawilża okolicę odbytu, co wpływa uśmierniająco na świąd, pieczenie i bolesność. Kwas hialuronowy wspiera powrót skóry do prawidłowego stanu fizjologicznego. Dodatek prebiotyku Biolin P chroni przed rozwojem bakterii patogennych i sprzyja rozwojowi fizjologicznej flory bakteryjnej.

#### **3. Dawkowanie i sposób podania wyrobu HemoPROCTOL**

**HemoPROCTOL** należy stosować zgodnie z instrukcją używania. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

#### **Sposób użycia:**

Przed zastosowaniem należy umyć ręce. Wycisnąć na palec pasek żelu o długości ok. 1,5 cm. Żel nanieść na uprzednio umytą i osuszoną okolicę odbytu, tak aby pokryć ją cienką warstwą produktu. Stosować w zależności od potrzeb (1-3 razy dziennie). Należy umyć ręce również po aplikacji. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Produkt może być stosowany nieprzerwanie do 14 dni.

#### 4. Ostrzeżenia

Jeśli w ciągu 14 dni stosowania żelu nie nastąpi poprawa, należy zwrócić się do lekarza. Jeżeli po zastosowaniu nastąpiło nasilenie objawów lub w przypadku objawów połączonych z krwawieniem, należy skonsultować się z lekarzem. Wyrób może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz matki karmiące piersią. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu oraz gdy opakowanie jest uszkodzone.

#### 5. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (alergia) na jakikolwiek składnik wyrobu. Ostry ból podczas oddawania stolca, owrzodzenia, przerwania ciągłości skóry właściwej w okolicy odbytu.

#### 6. Jak przechowywać wyrób HemoPROCTOL

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

#### 7. Skład wyrobu HemoPROCTOL

Składniki główne: hialuronian sodu, żel z aloesu zwyczajnego (*Aloe vera*), prebiotyk Biolin P.

Składniki pomocnicze: woda, gliceryna, polidokanol, karbomer, glikol pentylenowy, octan tokoferolu, sorbinian potasu, benzoesan sodu, wodorotlenek sodu.

#### 8. Opis opakowania

**HemoPROCTOL** pakowany jest w tubę polietylenową. Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, tubę oraz instrukcję używania.



Gofarm Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Górników 21/26  
30-819 Kraków, Polska  
www.gofarm.pl

#### Wyprodukowano dla:

Silesian Pharma Sp. z o.o.  
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice  
www.silesianpharma.pl



#### Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:

	Dane wytwórcy
	Data ważności
	Numer serii
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Temperatura przechowywania
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Numer katalogowy