

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu wyrobu medycznego **Rinolan spray nawilżający do nosa**, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.



INSTRUKCJA UŻYWANIA

RINOLAN

spray nawilżający do nosa

Wyrób medyczny

20 ml



1. Co to jest Rinolan spray nawilżający do nosa?

Rinolan spray nawilżający do nosa jest mieszaniną oleju sezamowego i olejków majerankowego oraz bergamotowego, przeznaczonego zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

Nie zawiera konserwantów ani propelentów.

2. W jakim celu stosuje się Rinolan spray nawilżający do nosa?

Wysuszone śluzówka, przebywanie w ogrzewanych, klimatyzowanych i zadymionych pomieszczeniach, czy stosowanie tlenu podczas zabiegów leczniczych – wszystko to sprawia, że zostaje utracony komfort swobodnego oddechu, który najbardziej odczuwalny jest podczas snu oraz spożywania posiłków. Konsekwencje braku utrzymania prawidłowego środowiska wewnątrz kanałów nosa mogą być poważne. Wysuszone błony śluzowe są idealnym miejscem dla rozwoju infekcji.

Rinolan spray nawilżający do nosa jest wyrobem uniwersalnym do stosowania w celu odpowiedniego nawilżenia, natłuszczenia oraz ukojenia podrażnionych błon śluzowych nosa. Dzięki zastosowaniu substancji olejowych na ich powierzchni tworzy się ochronna bariera zabezpieczająca tkanki przed nadmierną utratą wody spowodowaną czynnikami zewnętrznymi. Dodatek olejków majerankowego i bergamotowego zwiększa komfort stosowania wyrobu poprzez zapewnienie przyjemnego zapachu. Dodatkowo wyrób medyczny może być także stosowany na popękane i podrażnione okolice nosa, spowodowane częstym dmuchaniem nosa podczas infekcji czy alergii.

3. Dawkowanie i sposób podania

Rinolan spray nawilżający do nosa należy stosować zgodnie z instrukcją używania. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób użycia:

Zdjąć osłonkę, przygotować butelkę pompując spray kilkakrotnie do wytworzenia jednolitej dawki. Następnie wprowadzić aplikator do otworu nosowego i nacisnąć obustronnie podstawę aplikatora. Po każdorazowym użyciu należy oczyścić aplikator i nałożyć osłonkę z powrotem. Część produktu w miarę potrzeby może zostać rozproszona na popękanej i podrażnionej skórze okolic nosa.

Dawkowanie

Dla dzieci powyżej 6 roku życia oraz dorosłych.

1 do 3 dawek sprayu do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie zgodnie z potrzebą. Część produktu może zostać rozproszona na zewnętrzne okolice skóry nosa.

Nie należy stosować produktu po upływie daty ważności umieszczonej na spodzie butelki oraz na opakowaniu. Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest

używanie jednego produktu przez jedną osobę. W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem. **Produkt zawiera małe elementy. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.** Produkt do nosa. Unikać kontaktu oczami.

4. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość (alergia) na składniki produktu. Bezwzględnie nie należy stosować wyrobu w przypadku stwierdzonej alergii na sezam. Należy natychmiastowo odstąpić od stosowania wyrobu w przypadku wystąpienia objawów alergii (skórnych, oddechowych, pokarmowych lub innych) oraz skonsultować objawy z lekarzem.

5. Sposób przechowywania


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. Skład

Olej sezamowy, olejek majerankowy, olejek bergamotowy.

7. Opis opakowania








Rinolan spray nawilżający do nosa pakowany jest w plastikową butelkę zawierającą 20 ml produktu. Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, butelkę z etykietą oraz instrukcję używania.

 Gofarm Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Górników 21/26
30-819 Kraków, Polska
www.gofarm.pl

Dystrybutor:
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
www.silesianpharma.pl



Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:

| | |
|---|--|
|  | Dane wytwórcy |
|  | Data ważności |
|  | Numer serii |
|  | Zajrzyj do instrukcji używania |
|  | Ograniczenie dopuszczalnej temperatury przechowywania wyrobu |
|  | Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone |
|  | Numer katalogowy |

Data wydania instrukcji używania: grudzień 2022

RSNN/IU/12/2022

1328/01i/H