

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu wyrobu medycznego **SilConil Żel na blizny**, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.



INSTRUKCJA UŻYWANIA

SilConil

Żel na blizny

MD

15 g

1. Co to jest SilConil Żel na blizny?

SilConil Żel na blizny to skuteczny, bezzapachowy i bezpieczny żel silikonowy, przeznaczony do stosowania na blizny różnego rodzaju. Zawarte w nim silikony tworzą przezroczystą, ochronną powłokę, która zapewnia właściwe nawodnienie warstwy rogowej naskórka oraz uelastycznia strukturę blizny. Wpływają one także na zmniejszenie wielkości blizny oraz jej odbarwienia. Silikony niwelują negatywne odczucia napięcia tkanek oraz świądu wokół blizny, przynosząc ulgę. Odpowiednio wczesna pielęgnacja blizn przeciwdziała powstawaniu bliznowców (keloidów) oraz blizn przerostowych.

Wyrób medyczny **SilConil Żel na blizny** przeznaczony jest do stosowania na blizny niezależnie od czasu ich powstania. Może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci w różnym wieku. Zaleca się stosowanie wyrobu medycznego w przypadku blizn:

- pooperacyjnych (w tym po zabiegach mastektomii i cesarskiego cięcia),
- pourazowych,
- poparzeniowych,
- potrądzikowych,
- przerostowych i keloidów,
- po usunięciu tatuażu,
- po terapiach laserowych
- oraz rozstępów.

2. W jakim celu stosuje się SilConil Żel na blizny?

Blizna jest to zmiana powstała w wyniku procesu gojenia się rany. Struktura i wygląd blizny różni się od struktury i wyglądu skóry prawidłowej. W początkowym okresie gojenia blizna przybiera kolor czerwony, z czasem staje się coraz mniej elastyczna (blizna dojrzała), jaśniejsza i bardziej lśniąca od otaczającej ją skóry. Występowanie blizny jest naturalnym etapem gojenia się ran, jednak u niektórych pacjentów po urazach dochodzi do powstania blizn patologicznych, czyli bliznowców (keloidów) i blizn przerostowych. Blizny przerostowe charakteryzują się nadmiernym, nieprawidłowym rozwojem tkanki w obrębie rany. Blizna taka jest pogrubiona oraz wystaje ponad powierzchnię skóry. Bliznowce (keloidy) powstają w wyniku nadmiernego rozrostu blizny poza obszar gojenia się rany, czyli dotyczą także tkanek zdrowych. W obu przypadkach powodują one uczucie dyskomfortu oraz nieestetyczny wygląd. Bardzo ważna jest odpowiednia i wczesna pielęgnacja blizny, co pozwala na prawidłowy przebieg jej gojenia oraz zapobiega powstawaniu niekorzystnych zmian.

SilConil Żel na blizny przeznaczony jest do stosowania na każdy rodzaj blizn (również na twarzy) w celu: uelastyczenia blizny, zmniejszenia wielkości oraz wygładzenia blizny, zmniejszenia odbarwienia blizny, zmniejszenia odczucia napięcia tkanek wokół blizny, zmniejszenia odczucia świądu w okolicy blizny, zapobiegania powstawaniu blizn przerostowych oraz bliznowców (keloidów).

3. Dawkowanie i sposób podania

SilConil Żel na blizny należy stosować zgodnie z instrukcją używania. Wyrób przeznaczony do użytku zewnętrznego. Najlepiej stosować na świeże blizny. Stosować na nieuszkodzonej skórze.

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego **SilConil Żel na blizny** należy dokładnie umyć i osuszyć bliznę. Stosować od 2 do 4 razy dziennie. Niewielką ilość żelu wmasować w bliznę delikatnymi, kolistymi ruchami przez około 3 minuty. Pozostawić do wyschnięcia. Nadmiar żelu usunąć, aby uniknąć zabrudzenia ubrania. Na nałożoną warstwę żelu można stosować kosmetyki.

Stosowanie wyrobu medycznego **SilConil Żel na blizny** należy rozpocząć jak najwcześniej po zagojeniu się rany i stosować regularnie przez co najmniej 2 miesiące.

4. Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Nie stosować na błony śluzowe oczu, nosa i jamy ustnej. Nie stosować na otwarte, niezagojone lub sączące się rany. Nie stosować na nałożone wcześniej preparaty zawierające antybiotyki lub inne leki. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na składniki wyrobu. Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Nie stosować wyrobu w razie uszkodzenia opakowania bezpośredniego – tuby. Podczas stosowania **SilConil Żel na blizny** należy unikać oddziaływania na bliznę promieni słonecznych, wysokich lub niskich temperatur. Należy również chronić bliznę przed urazami i otarciami. Niewskazane jest korzystanie z sauny i solarium. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić Producentowi i Właściwemu Organowi Państwa Członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

5. Sposób przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


6. Skład

Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer.

Wyrób nie zawiera wody ani konserwantów.

7. Opis opakowania









SilConil Żel na blizny pakowany jest w plastikową tubę zawierającą 15 g wyrobu. Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, zadrukowaną tubę oraz instrukcję używania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

 Gofarm Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Górników 21/26, 30-819 Kraków, Polska
www.gofarm.pl

Dystrybutor: Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
www.silesianpharma.pl



Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:

 Producent	 25°C Ograniczenie temperatury przechowywania wyrobu
 Data ważności	 Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
 Numer serii	 Wyrób medyczny
 Zajrzyj do instrukcji używania	 Numer katalogowy