

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu wyrobu **Audiolive spray do uszu**, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.

MD

Wyrób medyczny

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Audiolive
spray do uszu

Spray do usuwania woskowiny usznej 15 ml

REF

ENT07

1. Co to jest Audiolive spray do uszu?

Audiolive spray do uszu to skuteczny i bezpieczny spray do ucha, który w naturalny sposób rozpuszcza i usuwa zalegającą woskowinę. Dodatkowo nawilża kanał słuchowy, utrzymując w ten sposób jego prawidłową higienę. Czysty i odpowiednio nawilżony przewód słuchowy zapobiega gromadzeniu się woskowiny, co przeciwdziała skutkom jej zalegania (m.in. stanom zapalnym). Dodatkowo zawarty w wyrobie medycznym **Audiolive spray do uszu** olejek miętowy poprzez przyjemny zapach zapewnia lepszy komfort stosowania wyrobu.

Nie zawiera wody ani konserwantów.

2. W jakim celu stosuje się Audiolive spray do uszu?

Fizjologicznie woskowina chroni ucho przed zanieczyszczeniami, ciałami obcymi i infekcjami. Stanowi naturalną barierę przeciwdziałającą rozwojowi bakterii, wirusów i grzybów. Woskowina natłuszcza przewód słuchowy zewnętrzny, przez co chroni jego skórę przed drobnymi urazami i zapobiega przedostawaniu się wody w głąb przewodu słuchowego. Dostające się do ucha drobne ciała obce (np. cząsteczki kurzu) zostają unieruchomione, a następnie usunięte z ucha dzięki mechanizmowi samooczyszczania. Woskowina zasycha w drobne grudki, które przesuwały się ku obwodowi i następnie wypadają z przewodu słuchowego.

Niektórzy ludzie mają wąskie lub specyficznie ukształtowane przewody słuchowe, tak że nawet niewielka ilość woskowiny ma tendencję do zalegania w uchu, a u innych woskowina wytwarzana jest w większej niż przeciętnie ilości. Mechanizm samooczyszczania może wtedy zawodzić i obserwuje się tendencję do nadmiernego gromadzenia woskowiny w uchu. Skłonność do nadmiernego wydzielania woskowiny może być wrodzona i powodować zaleganie woskowiny już od najmłodszych lat (niemowlęta i dzieci). Wtedy też woskowina wydzielana jest bardziej obficie, co niepokoi rodziców małych dzieci, a widać ją w postaci kleistej mazi wydzielającej się na zewnątrz.

Innym istotnym powodem zwiększonego wydzielania woskowiny jest mechaniczne drażnienie skóry przewodu słuchowego, np. u użytkowników aparatów słuchowych, telemarketerów oraz osób noszących przez większość dnia słuchawkę w uchu, czy u osób stosujących patyczki higieniczne do czyszczenia uszu.

Tworzące się złogi woskowiny usznej prowadzą do uczucia pogorszenia słuchu, szumu w uszach, zatkania ucha zwłaszcza po kąpieli (rozpułchniony czop woskowinowy całkowicie zatyka ucho), przykrego uczucia trzeszczenia, chrobotania w uchu, zwłaszcza przy ruchach głowy, bólu ucha (zalegający czop drażni i może doprowadzić do zapalenia skóry przewodu), nieprzyjemnego odbioru własnego głosu (pogłos).

Zastosowanie wyrobu umożliwia utrzymanie przewodu słuchowego w czystości, co zapobiega gromadzeniu woskowiny i przeciwdziała skutkom jej zalegania (m.in. stanom zapalnym).

Właściwości i wskazania:

- rozpuszczanie i usuwanie złogów woskowiny usznej,
- nawilżanie błon śluzowych zewnętrznego przewodu słuchowego,
- higiena uszu szczególnie u osób noszących aparaty słuchowe, jak również u osób z nadprodukcją woskowiny,
- eliminacja zalegania wody w kanale ucha po kontakcie z wodą.

3. Dawkowanie i sposób podania wyrobu Audiolive spray do uszu:

Audiolive spray do uszu należy używać zgodnie z instrukcją używania dołączonej do opakowania. Tylko do użytku zewnętrznego.

Dawkowanie:
Rozpuszczanie i usuwanie złogów:
Rozpylić 1-2 dawki do każdego przewodu słuchowego od 3 do 5 razy dziennie, aż do całkowitego usunięcia woskowiny.
Profilaktycznie (w celu zapobiegania tworzenia złogów):
Rozpylić 1-2 dawki do każdego przewodu słuchowego od 1 do 2 razy w tygodniu.
Profilaktycznie przed kąpielą:
Rozpylić 1-2 dawki do każdego ucha bezpośrednio przed kontaktem z wodą.
Wyrób medyczny do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 3. miesiąca życia. U niemowląt i małych dzieci stosować po konsultacji z lekarzem.

Sposób użycia:
Przed pierwszym użyciem opakowania wyrobu medycznego **Audiolive spray do uszu** wstrząśnij buteleczkę, a następnie wprowadź w pionowej pozycji aplikator do zewnętrznego przewodu słuchowego i naciśnij kilka razy aż pojawi się płyn. Zaaplikuj odpowiednią dawkę wyrobu. Powtórz tą samą czynność w drugim uchu. Forma sprayu zapewnia równomierne rozpylanie i precyzyjne jego dawkowanie. Po użyciu preparatu, końcówkę aplikatora należy umyć pod bieżącą wodą.

4. Przeciwwskazania i ostrzeżenia
Nadwrażliwość (alergia) na składniki wyrobu. Produkt do ucha, unikać kontaktu z oczami. Nie należy stosować wyrobu po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego. Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem. Nie stosować u pacjentów z perforacją błony bębenkowej, infekcją, bólem ucha lub założonym drenażem. W przypadku infekcji, bólu ucha lub innych niepokojących objawów i wątpliwości przed użyciem wyrobu należy skonsultować się z lekarzem. Należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego użycia. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić Producentowi i Właściwemu Organowi Państwa Członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

5. Sposób przechowywania:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej, w temperaturze 15-25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. Skład:
Olej z oliwek (99,95%) oraz olejek miętowy. Nie zawiera wody ani konserwantów.

7. Opis opakowania:
Produkt pakowany jest w butelki zawierające 15 ml wyrobu. Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, butelkę z etykietą oraz instrukcję używania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

 Gofarm Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Górników 21/26, 30-819 Kraków, Polska
www.gofarm.pl

 Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
www.silesianpharma.pl



Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:

 Producent	 Zapoznaj się z instrukcją używania
 Dystrybutor	 15 °C – 25 °C Temperatura przechowywania
 Data ważności	 Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
 Numer serii	 Wyrób medyczny
 Numer katalogowy	