

Należy uważnie przeczytać instrukcję używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne dla pacjenta informacje o zastosowaniu wyrobu medycznego **Optico Krople do oczu ze świetlikiem**, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie przeczytać.

Wyrób medyczny

OPTICO

Krople do oczu ze świetlikiem

Instrukcja używania

1. Co to jest wyrób Optico Krople do oczu ze świetlikiem i w jakim celu się go stosuje?

Optico Krople do oczu ze świetlikiem to wyrób medyczny w postaci sterylnego, okulistycznego roztworu buforowanego o pH 7,2 z ekstraktem z rumianku i świetlika lekarskiego. Zalecany do suchych, zaczerwienionych i podrażnionych oczu. Krople chronią, nawilżają, odświeżają i łagodzą podrażnienia oczu. Produkt kompatybilny ze wszystkimi soczewkami kontaktowymi. Krople mogą być stosowane podczas noszenia soczewek kontaktowych. Do aplikowania zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Można stosować produkt w trakcie leczenia homeopatycznego.

Wskazania do stosowania:

- dla nawilżenia, łagodzenia, ochrony, odświeżenia suchych, zaczerwienionych i podrażnionych oczu;
- środek wspomagający w leczeniu objawów alergii, kataru siennego i alergicznego zapalenia spojówek;
- idealny jako naturalny środek dla rozjaśnienia białka oka w przypadku zaczerwienienia wywołanego zmęczeniem, alergią i podrażnieniem;
- dla ukojenia oka w przypadku swędzenia, pieczenia, uczucia ciała obcego w oku i podrażnienia oczu;
- wyrób idealny w przypadku nieurazowych/niepatologicznych zaburzeń w ciągłości filmu łzowego;
- dla zmniejszenia uczucia dyskomfortu powstałego w wyniku działania czynników środowiskowych na oczy (np. nadmierna ekspozycja na światło słoneczne, wiatr, kurz, klimatyzacja, suche i zanieczyszczone powietrze);
- dla ulgi w przypadku oznak przemęczenia wzroku (np. długotrwałe korzystanie z komputera, niekorzystne warunki oświetleniowe, jazda nocą);
- dla osób, które długotrwałe stosują soczewki kontaktowe.

2. Dawkowanie i sposób podania

Optico Krople do oczu ze świetlikiem należy stosować zgodnie z instrukcją używania. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób użycia:

- Przed użyciem należy dokładnie umyć i osuszyć ręce.
- Przed otwarciem upewnić się, że zabezpieczenie buteleczki i buteleczka nie są uszkodzone.
- Przechylić głowę do tytu, lekko odchylając dolną powiekę, wkropić 1-2 krople do każdego oka, jeden lub więcej razy dziennie, w razie potrzeby lub zgodnie z zaleceniami specjalisty. Kilukrotnie zamrużyć. W razie potrzeby powtórzyć dla drugiego oka. Stosować raz dziennie lub częściej, przez kilka dni, w zależności od potrzeb lub zaleceń lekarza.
- Dla użytkowników soczewek kontaktowych: wkropić 2-3 krople na soczewkę przed założeniem lub po założeniu. Podczas noszenia soczewek kontaktowych, w razie potrzeby czynność powtórzyć.
- W przypadku stosowania u dzieci produkt musi być podawany przez osobę dorosłą.
- Po każdym użyciu dokładnie zamknąć butelkę.
- Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

3. Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Wyrób sterylny do pierwszego otwarcia.
- Nie używać jeśli butelka jest uszkodzona.
- Nie połykać. Do stosowania wyłącznie do oczu.
- Nie dotykać powierzchni oka lub powieki końcówką zakraplacza.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia oczu należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Skonsultuj się z lekarzem w przypadku stosowania u dzieci poniżej 3. roku życia, w czasie ciąży, karmienia piersią i w przypadku innych patologii.
- Nie stosować w przypadku alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować po upływie terminu przydatności wyrobu do użycia. Termin ważności podany jest na spodzie kartonika i etykiecie.
- Nie zamrażać.
- **Zużyć w ciągu 90 dni od pierwszego otwarcia.**
- Podawać wyrób co najmniej 5 minut przed lub po podaniu innych wyrobów okulistycznych o działaniu miejscowym.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić Producentowi i Właściwemu Organowi Państwa Członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

4. Warunki przechowywania

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy 5 a 35°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5. Skład: Ekstrakt z rumianku 0,5% (*Chamomilla recutita*), ekstrakt ze świetlika lekarskiego 0,5% (*Euphrasia officinalis*), wersenian disodowy (EDTA), N-hydroksymetyloglicynian sodu, bufor boranowy, chlorek sodu, woda dejonizowana.

6. Opis opakowania

Optico Krople do oczu ze świetlikiem pakowany jest w plastikową butelkę, z fabrycznie założoną plombą i zakrętką, zawierającą 10 ml sterylnego wyrobu. Opakowanie jednostkowe zawiera: kartonik, buteleczkę z etykietą oraz instrukcję używania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu

	Należy zapoznać się z instrukcją użycia		Numer serii
	Przechowywać w temperaturze 5-35°C		Termin przydatności wyrobu do użycia
	Producent		Sterylizowane przy zastosowaniu technik aseptycznego przetwarzania
	Dystrybutor		Nie używać, gdy opakowanie jest uszkodzone
	Oznakowanie zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej		Wyrób Medyczny

 **Omisan farmaceutici**
via G. Galilei - Guidonia M. (RM) Italy
www.omisan.com

 Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice,
www.silesianpharma.pl

Data aktualizacji instrukcji: czerwiec 2025.

3079/021/AU

10 ml